



O2Vigor kyslík v plechu

Návod na použití

POKYNY K POUŽITÍ



Odstraňte masku a minivíčko z plechovky. Držte masku nápisem **UP** směrem nahoru a připojte k trysce. Inhalační nástavec - masku nasadte na ústa a nos. Potom tlačte trysku dolů. Držte na místě po dobu 1-2 vteřiny a zhluboka se nadechněte alespoň pětkrát. Obsah stačí pro ca. 80 resp. 120 nadechnutí dle velikosti plechovky. Lze použít při tělesné únavě a nedostatečné koncentraci, pro rychlejší regeneraci během a po sportu a při alergických obtížích s dýcháním či při bolestech hlavy.

POZOR!

Nádobka je pod tlakem.

- Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 40°C.
- Není určeno k opakovanému plnění.
- Nikdy plechovku neotvírejte násilím ani nevhazujte do ohně.
- Nestříkejte proti plameni nebo na žhavé předměty.
- **NEKUŘTE** (ani elektronické cigarety) a nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti tlakových lahví s obsahem medicínálních plynů.
- Nikdy nepoužívejte olej, tuk nebo jakékoli přípravky na bázi oleje, včetně krémů na ruce, když manipulujete s tlakovou lahví přípravku.
- Manipulaci s ventily a zařízeními, která k nim náleží, provádějte **VŽDY** čistýma, nemastnýma rukama, vyvarujte se používání krémů, make-upu, olejů apod.
- Manipulujte s lahví obezřetně, netřepte s ní, zamezte pádům a otřesům, lahve uchovávejte v dobře větraných prostorách vyhrazených k uchování medicínálních plynů, mimo dosah hořlavín, hořlavého materiálu a zdrojů tepla.

Tlak plnění: 1 MPa (10bar)

Objem plechovky: 0,8 l nebo 1,2 l

Obsah: 8l nebo 12l

Výrobce: Xi'an Arooxy Technology Co., Ltd

Dovozce do EU:

Lukáš Paufošima – O2Vigor.cz

Čejkovická 4093/13 628 00 Česká republika

Telefon: +420 602 966 944 Web: www.o2vigor.cz

Ozn. Šarže / Použitelné do: viz dno!

Použité symboly:

Nebezpečí vzplanutí při kontaktu s hořlavými látkami.

Nepatří do rukou dětem.

Udržujte z dosahu hořlavých látek.

Do recyklační nádoby odhazujte pouze zcela prázdnou plechovku.



datum poslední revize textu: listopad 2020